

692

Faltbare Rampen

Das Fahren eines Scooters oder Rollstuhls im Auto wird dank der Rampen einfach. Diese faltbaren Rampen sorgen dafür, dass Sie schwere Scooter oder Rollstühle sicher im Auto platzieren können.




**Inklusive Aufbewahrungsbeutel.
Ein Set enthält zwei Rampen.**



Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Angaben 692

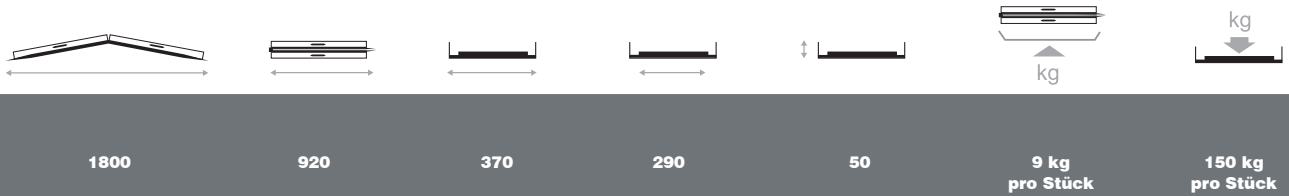

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich

01 Griffe zum einfachen Transport der Rampen

02 Rutschfeste Oberfläche für eine bessere Traktion des Scooters oder Rollstuhls


Maximale Belastung **03**
150 kg pro Rampe

Benutzen der Rampen

Die Rampen sind einfach zu bedienen:

1. Klappen Sie die Rampe auf.
2. Legen Sie die rutschfeste Auflage auf die zu überwindende Oberfläche.
3. Kontrollieren Sie, dass die Rampen stabil sind.
4. Fahren Sie mit dem leeren Scooter oder Rollstuhl die Rampen hinauf.

04 Mit rutschfester Auflage für besseren Halt der Rampen

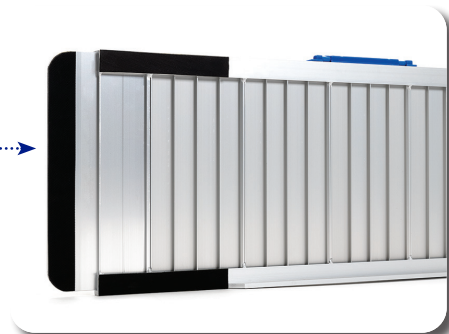

Vermeiren Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Schweiz

Tel.: +41 (0) 33 335 14 75
Fax: +41 (0) 33 335 14 67

Mail: info@vermeiren.ch
Site: www.vermeiren.ch



VERMEIREN

Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.



Technische Änderungen vorbehalten.