




VICAIR[®]

4

EL COJÍN DE ALTAS PRESTACIONES EN PROTECCIÓN DE LA PIEL PARA SILLA DE RUEDAS MÁS FÁCIL DE USAR

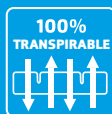

 100% PRODUCTO
 HOLANÉS

relief by air

PROTECCIÓN DE LA PIEL DE ALTO RENDIMIENTO

EXTREMADAMENTE FÁCIL DE USAR

- ▶ Protección de la piel de alto rendimiento mediante una redistribución uniforme de la presión
- ▶ Extremadamente fácil de usar
- ▶ Dando soporte a la pelvis y los muslos para una sedestación estable



Seguro en cualquier posición:
arriba=abajo; izquierda=derecha;
delante=detrás.



4 compartimentos idénticos

El Vicair 4 es un cojín para usuarios de silla de ruedas. Consiste en cuatro compartimentos idénticos, que proporcionan confort, protección de la piel de alto rendimiento y soporte postural. El Vicair 4 permite, a quien se sienta en él, inmersión y envolvimiento por el relleno de SmartCell del cojín. Esto crea una sedestación estable y ayuda a proteger la piel distribuyendo la presión de manera uniforme y minimizando las fuerzas de cizallamiento. El Vicair 4 se ajusta automáticamente al contorno, incluso en casos con una ligera oblicuidad pélvica.


El Vicair 4 es extremadamente fácil y seguro de usar: El cojín siempre estará colocado correctamente, porque los cuatro lados pueden ser tanto delantero como trasero, siendo idéntico arriba y abajo. Es además totalmente lavable a máquina a máximo 60°C. No se necesita bomba de inflado u otro equipo para configurar o para usar el Vicair 4. El cojín es seguro en el tiempo, no es necesario un ajuste diario: cientos de SmartCells crean varias capas entre el usuario y la superficie del asiento.

		anchura				
Inch		16	17	18	19	20
	CM	40	43	45	48	50
16	40					
17	43					
18	45					
19	48					
20	50					

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Grosor 8 cm / 3¼"
- Peso promedio 0,8 kg / 1.8 lbs
- Peso máx. usuario 250 kg / 551 lbs
- Tamaños disponibles Ver la tabla de tallas

- Disponible
- No disponible

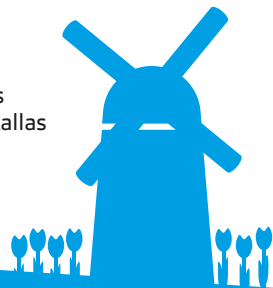



CONTROL DEL MICROCLIMA

El microclima de la piel es un factor de riesgo indirecto adicional para desarrollar lesiones por presión. El microclima se ve afectado por la temperatura y la humedad en contacto con la piel. Por lo tanto, se recomienda mantener la piel seca y fresca. El cojín Vicair 4 está fabricado íntegramente en tejido perforado. Esto permite que el exceso de humedad se drene de la piel. La estructura abierta también permite que el aire fluya fácilmente hacia adentro, hacia afuera y a través del cojín, por lo que se reduce la acumulación de calor. En general, mantiene la piel lo más seca y fresca posible en todas las circunstancias.

LAVABLE A MÁQUINA

Tener siempre un cojín limpio e higiénico para sentarse, ¡nunca ha sido tan fácil! Si una persona usa intensamente un cojín durante un período largo de tiempo, éste puede ensuciarse, y seguramente lo hará. Por eso es importante que se pueda limpiar de forma adecuada y sencilla. El Vicair 4 se puede lavar completamente a máquina hasta 60 ° C (140 ° F). No se necesitan máquinas, procesos o desinfectantes especiales, solo una lavadora y un poco de detergente. Después del lavado se puede secar al aire durante un par de horas y vuelve a estar listo para usarlo de nuevo.



ETIQUETA CODIFICADA POR COLORES, PARA SU COMODIDAD

Hemos agregado una etiqueta codificada por colores a juego tanto en el cojín como en la funda del cojín. Esto le mostrará fácilmente si el cojín y la funda son del mismo tamaño, sin tener que verificar la información en las etiquetas del producto. Esta función es especialmente conveniente en un entorno en el que se utilizan varios cojines Vicair 4. El código de colores es exclusivo de este modelo de Vicair.

Protección de la piel, apoyo postural
y fácil de usar. Por eso Vicair es
¡el Pack Perfecto!

- Usuarios de Vicair en todo el mundo

VICAIR, TECNOLOGÍA INNOVADORA

El mejor medio para la redistribución de la presión es el aire. Vicair ha capturado este aire en SmartCells, en cada cojín hay cientos de ellas. Las celdas se mueven individualmente, ajustando lentamente el cojín al contorno del cuerpo. El resultado es una redistribución superior, óptimo posicionamiento y un gran confort para el usuario.

La tecnología Vicair se desarrolló en cooperación con el Amsterdam Rehabilitation Centre (Reade) y fue galardonada con el Grand Prix en el "Salon des Inventions" en Ginebra, Suiza.




LISTO PARA USAR

El cojín Vicair está listo para usar directamente de la caja



LAVABLE A MÁQUINA 100%

El cojín, con las SmartCells en su interior, es totalmente lavable a máquina a 60°C

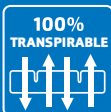

TRANSPIRABLE 100%

La estructura abierta del cojín ofrece una óptima regulación de la humedad y la temperatura



FORMA SÓLIDA

Este modelo de cojín, mantiene su forma, mejorando la protección de la piel del usuario



Garantía de por vida para la actual generación Vicair SmartCells

VICAIR®

Bruynvisweg 5
1531 AX Wormer
The Netherlands
T + 31 (0)75 642 99 99
info@vicair.com
vicair.com

Síguenos en



DETALLES DE CONTACTO DEL DISTRIBUIDOR



T: +34 972 428 433 F: +34 972 42 92 39
info@vermeiren.es
www.vermeiren.es